

filmer

GEBRAUCHSANWEISUNG ALKOHOL-TESTER



Art.-Nr. 18.047

© Diedrich Filmer GmbH

ALLGEMEINE HINWEISE:


Führen Sie den Test ca. 20 Minuten nach Verzehr alkoholischer Getränke durch. Erst dann ist der Alkohol in das Blut gelangt.

- 20 Minuten vor dem Test nach Möglichkeit nicht rauchen und essen.
- Das Gerät nicht mit chemischen Mitteln reinigen.
- Den Sensor vor Flüssigkeiten schützen.
- Die Alkoholwert-Angabe dient lediglich als Anhaltspunkt.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung.


1. Kappe auf der Rückseite nach unten schieben und 2x AAA / 1,5V Batterien einsetzen.



2. Nach Drücken der Power Taste erscheint im LCD-Display „Warm up“ und ein Countdown für 10 Sekunden. Nach Ablauf der Zeit, ist das Gerät einsatzbereit.

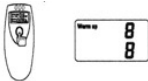

3. Wenn im Display das Wort „Blow“ erscheint, halten Sie das Gerät dicht an Ihren Mund und pusten für etwa 3-5 Sekunden hinein.

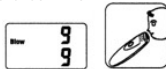

4. Nach einer kurzen Wartezeit erscheint das Ergebnis im Display. Ab einem Alkoholwert von 0,02% BAC bzw. 0,2 g/l erscheint das „Caution“ Symbol im Display.




5. Ab einem Alkoholwert von 0,05 % BAC bzw. 0,5 g/l erscheint das „Danger“ Symbol im Display.



6. Das Gerät schaltet sich nach ca. 10 Sekunden eigenständig aus.

Tipp:

Um ein möglichst genaues Ergebnis zu bekommen, empfiehlt der Hersteller den Test 2 mal zu wiederholen.

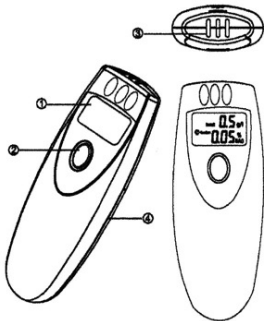

1. LCD-Display
2. Anschalter
3. Mundstück zum Pusten
4. Batteriefach

Diedrich Filmer GmbH
Jeringhaver Gast 5
D - 26316 Varel
Tel.: +49 (0) 4451 1209-0
www.filmer.de